



BENETEC
Advanced Medical Systems

WC-400MM SILICONE WORD/BARTHOLIN KATHETER MET INJECTIESPUIT EN SCALPEL



**Product n°: WC-400mm
Set van 6 / verpakking
FDA/GMP conform
ISO13485 gecertificeerd
CE-merk**

De opblaasbare Word/ Bartholin-katheter van Bioteque America is gemaakt van siliconen van medische kwaliteit. Hij wordt gebruikt voor de behandeling van abscessen van de Bartholin-klier, gewoonlijk een Bartholin-cyste genoemd. De WC-400mm katheterset bevat de siliconen opblaasbare katheter met een scalpel, een injectiespuit en een naald.

PROCEDURE

Maak een incisie in de buitenwand van de cyste om het abces te draineren. Nadat het abces is gedraineerd, brengt u de leeggelopen siliconekatheter door de incisie en in het abces. Blaas met behulp

van de 3 cc spuit, gevuld met een zoutoplossing, de siliconen katheter voorzichtig op in de cysteholte door de zoutoplossing in de katheter te spuiten. Verwijder na het opblazen de spuit en de naald en laat de zelfdichtende, met zoutoplossing opgeblazen Word/Bartholin katheter achter in het abces.

Nadat de epithelisatie van een nieuwe opening is voltooid, worden de zoutoplossing en de katheter uit de cyste verwijderd. Nadat de katheter is verwijderd, zal het abces in het algemeen krimpen en volledig genezen, zodat de Bartholin-klier normaal kan functioneren.

**Heb je interesse in onze Word/Bartholin katheter? Contacteer ons via:
sales@benetecmed.com**